

## VIKTIGT


- Använd inte efter utgångsdatum.
- Förvara torrt i temperaturer mellan 4-30°C. Skall inte frysas.
- Öppna inte testets skyddande foliepåse förrän precis före användning. Använd inte om foliepåsen är skadad.
- För in vitro diagnostiskt bruk. Skall inte förtäras. För självttest.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Undvik direkt hudkontakt med urinprov och använd testkassetter om testet tas på annan person.
- Återanvänd inte testkassetten.

## OBSERVERA

Det är rekommenderat att du dricker mindre vatten före provtagning. Vattenintag kan späda ut koncentrationen av hCG. Testlagret Graviditetstest upptäcker halter av hCG på 25 mIU/mL eller mer. Att dricka alkohol under graviditeten kan vara skadligt för fostret.

## ANVÄNDNING

1. Öppna foliepåsen, ta ut testkassetten och medföljande pipett.
2. Lägg testkassetten på en ren och plan yta.
3. Kissa i en ren och torr behållare.
4. Använd den medföljande pipetten för att få upp urin ur behållaren. Håll pipettens öppning lodrätt ner mot urinen. Tryck in pipettens luftbehållare och doppa sedan ner pipettens öppning i urinen. Släpp sedan luftbehållaren. Pipetten kommer nu att suga upp urin.
5. Håll pipetten över testkassetten **RUNDA** håll märkt med ett "S", tryck sedan försiktigt på pipettens luftbehållare så att 3 droppar urin hamnar i kassetten runda hål.
6. När testet reagerar med urinen kan det hända att du ser en ljusröd färg som rör sig förbi testkassetten testregion (T) och kontrollregion (C). Vänta minst 3 minuter innan du avläser de röda linjerna. Om ingen röd linje visas vänta ytterligare 1-2 minuter. Vissa positiva resultat kan visas redan efter 1 minut eller mindre beroende på hur hög koncentrationen av hormonet hCG är. **Läs inte av resultatet efter mer än 10 minuter.**

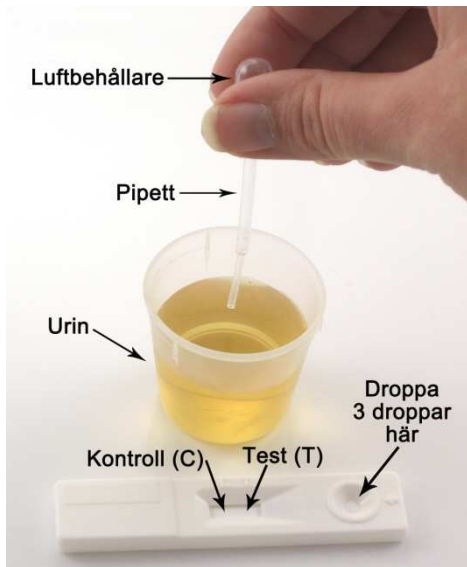

## TOLKA RESULTATET



### GRAVID

Om det finns två röda linjer, en i testregionen (T) och en i kontrollregionen (C) betyder det att du sannolikt är gravid. En linje kan vara starkare än den andra, de behöver inte vara lika starka.



### INTE GRAVID

Om det enbart finns en röd linje, i kontrollregionen (C), betyder det att du sannolikt inte är gravid.



### OGILTIGT

Om det inte finns någon röd linje i kontrollregionen (C) är testet ogiltigt. Även om en röd linje syns i testregionen (T) är testet ogiltigt och ett nytt test ska göras.



## INNEHÅLL

1 x Testlagret Graviditetstest testkasset,  
1 x fuktabsorberande påse per folieförpackning  
och 1 x pipett.

## SAMMANSÄTTNING

Kolloid guld täckt med get anti-mus IgG antikroppar och mus anti  $\beta$  hCG antikroppar.

## REPRODUCERBARHET

Enligt kliniska studier är reproducerbarheten hos Testlagret Graviditetstest 100 %. Inga avvikande resultat observerades.

## FRÅGOR OCH SVAR

### 1. Hur fungerar testet?

Testlagret Graviditetstest ger utslag på ett hormon som din kropp producerar under graviditeten. Koncentrationen av graviditetshormonet ökar i takt med att din graviditet utvecklas.

### 2. Hur tidigt kan jag testa för att se om jag är gravid?

Du bör testa första dagen av utebliven mens. Det är dock möjligt att testa så tidigt som sju dagar efter befruktning.

### 3. Måste jag använda morgonurinen?

Du kan använda testet valfritt tid på dagen, men morgonurinen innehåller vanligen högre koncentrationer av graviditetshormonet hCG.

### 4. Hur pålitligt är testet?

Kliniska studier har gjorts både i laboratorier och med konsumenter. Dessa studier bevisar att Testlagret Graviditetstest ger rätt resultat i mer än 99% av fallen.

### 5. Vilka faktorer kan påverka testresultatet?

Läkemedel som innehåller hCG (exempelvis Pregnyl) kan orsaka ett falskt positivt resultat. Alkohol, p-piller, värktabletter, antibiotika eller hormonbehandling som inte innehåller hCG ska inte påverka testresultatet.

### 6. Vad ska jag göra om resultatet visar att jag är gravid?

Det betyder att din urin innehåller hCG och att du sannolikt är gravid. Besök en läkare eller barnmorska för att bekräfta graviditeten och diskutera nästa steg.

### 7. Kan resultatet visa någonting annat än en normal graviditet om det visar att jag är gravid?

Ett antal medicinska tillstånd utöver graviditet kan orsaka förhöjda halter av hCG och orsaka ett falskt positivt resultat. Exempel på sådana tillstånd är utomkvedshavandeskap och cystor på äggstockarna.

### 8. Hur vet jag att testet fungerade korrekt?

Om du ser en linje i testets kontrollregion (C) har testet fungerat normalt och rätt mängd urin har sugits upp.

### 9. Vad ska jag göra om testet visar att jag inte är gravid?

Det betyder att inget graviditetshormon har upptäckts i din urin och sannolikt är du inte gravid. Om du inte får din mens inom en vecka efter dagen för beräknad mens gör ett nytt test. Får du samma resultat och du fortfarande inte fått din mens, besök din läkare.

### 10. Hur hög koncentration av hCG krävs för att upptäckas av testet?

Testlagret Graviditetstest upptäcker halter av hCG på 25 mIU/ml eller mer. Normal nivå av hCG på dagen för beräknad mens vid graviditet är 100 mIU/ml.

## SYMBOLER

- LOT/ Batch-nummer
- Tillverkare
- Går inte att återanvända
- Använd senast
- In vitro diagnostisk produkt

## KONSUMENTKONTAKT

Testlagret AB  
Box 4243  
20313 Malmö, Sverige  
kundtjanst@testlagret.se  
www.testlagret.se

Testlagret AB  
Box 4243  
20313 Malmö, Sverige

