

VIKTIGT


- Använd inte efter utgången datum.
- Förvara torrt i temperaturer mellan 4-30°C. Skall inte frysas.
- Öppna inte testets skyddande foliepåse förrän precis före användning. Använd inte om foliepåsen är skadad.
- För in vitro diagnostiskt bruk. Skall inte förtäras. För självttest.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Undvik direkt hudkontakt med urinprov och använd teststavar om testet tas på annan person.
- Återanvänd inte teststaven.

OBSERVERA

Det är rekommenderat att du dricker mindre vatten före provtagning. Vattenintag kan späda ut koncentrationen av hCG. Testlagret Graviditetstest upptäcker halter av hCG på 25 mIU/mL eller mer. Att dricka alkohol under graviditeten kan vara skadligt för fostret.

ANVÄNDNING

1. Öppna foliepåsen och ta ut teststaven.
2. Ta av korken, lägg den i din närhet så länge.
3. Håll teststaven i ett tumgrepp och placera den uppsugande delen i urinstrålen i minst 10 sekunder tills den är ordentligt blöt.
4. **OBS! Kissa inte** på resultatfönstret där testregionen (T) och kontrollregionen (C) finns. Det går också att kissa i en ren och torr behållare och sen doppa den uppsugande delen i urinen i minst 10 sekunder.
5. Sätt på korken och lägg teststaven på en plan yta med resultatfönstret uppåt och börja tidtagningen.
6. När testet reagerar med urinen kan det hända att du ser en ljusröd färg som rör sig förbi teststavens testregion (T) och kontrollregion (C). Vänta minst 3 minuter innan du avläser de röda linjerna. Om ingen röd linje visas vänta ytterligare 1-2 minuter. Vissa positiva resultat kan visas redan efter 1 minut eller mindre beroende på hur hög koncentrationen av hormonet hCG är. **Läs inte av resultatet efter mer än 10 minuter.**

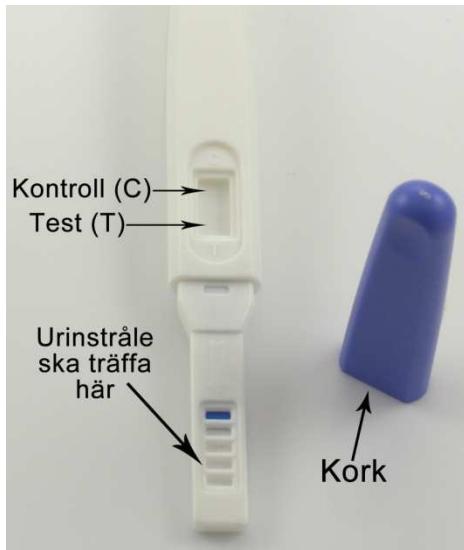

TOLKA RESULTATET



GRAVID

Om det finns två röda linjer, en i testregionen (T) och en i kontrollregionen (C) betyder det att du sannolikt är gravid. En linje kan vara starkare än den andra, de behöver inte vara lika starka.



INTE GRAVID

Om det enbart finns en röd linje, i kontrollregionen (C), betyder det att du sannolikt inte är gravid.



OGILTIGT

Om det inte finns någon röd linje i kontrollregionen (C) är testet ogiltigt. Även om en röd linje syns i testregionen (T) är testet ogiltigt och ett nytt test ska göras.



INNEHÅLL

- 1 x Testlagret Graviditetstest teststav och
- 1 x fuktabsorberande påse per folieförpackning.

SAMMANSÄTTNING

Kolloid guld täckt med get anti-mus IgG antikroppar och mus anti β hCG antikroppar.

REPRODUCERBARHET

Enligt kliniska studier är reproducerbarheten hos Testlagret Graviditetstest 100 %. Inga avvikande resultat observerades.

FRÅGOR OCH SVAR

1. Hur fungerar testet?

Testlagret Graviditetstest ger utslag på ett hormon som din kropp producerar under graviditeten. Koncentrationen av graviditetshormonet ökar i takt med att din graviditet utvecklas.

2. Hur tidigt kan jag testa för att se om jag är gravid?

Du bör testa första dagen av utebliven mens. Det är dock möjligt att testa så tidigt som sju dagar efter befruktning.

3. Måste jag använda morgonurinen?

Du kan använda testet valfritt tid på dagen, men morgonurinen innehåller vanligen högre koncentrationer av graviditetshormonet hCG.

4. Hur pålitligt är testet?

Kliniska studier har gjorts både i laboratorier och med konsumenter. Dessa studier bevisar att Testlagret Graviditetstest ger rätt resultat i mer än 99% av fallen.

5. Vilka faktorer kan påverka testresultatet?

Läkemedel som innehåller hCG (exempelvis Pregnyl) kan orsaka ett falskt positivt resultat. Alkohol, p-piller, värktabletter, antibiotika eller hormonbehandling som inte innehåller hCG ska inte påverka testresultatet.

6. Vad ska jag göra om resultatet visar att jag är gravid?

Det betyder att din urin innehåller hCG och att du sannolikt är gravid. Besök en läkare eller barnmorska för att bekräfta graviditeten och diskutera nästa steg.

7. Kan resultatet visa någonting annat än en normal graviditet om det visar att jag är gravid?

Ett antal medicinska tillstånd utöver graviditet kan orsaka förhöjda halter av hCG och orsaka ett falskt positivt resultat. Exempel på sådana tillstånd är utomkvedshavandeskap och cystor på äggstockarna.

8. Hur vet jag att testet fungerade korrekt?

Om du ser en linje i testets kontrollregion (C) har testet fungerat normalt och rätt mängd urin har sugits upp.

9. Vad ska jag göra om testet visar att jag inte är gravid?

Det betyder att inget graviditetshormon har upptäckts i din urin och sannolikt är du inte gravid. Om du inte får din mens inom en vecka efter dagen för beräknad mens gör ett nytt test. Får du samma resultat och du fortfarande inte fått din mens, besök din läkare.

10. Hur hög koncentration av hCG krävs för att upptäckas av testet?

Testlagret Graviditetstest upptäcker halter av hCG på 25 mIU/ml eller mer. Normal nivå av hCG på dagen för beräknad mens vid graviditet är 100 mIU/ml.

SYMBOLER

- LOT/Batch-nummer
- Tillverkare
- Går inte att återanvända
- Använd senast
- In vitro diagnostisk produkt

KONSUMENTKONTAKT

Testlagret AB
Box 4243
20313 Malmö, Sverige
kundtjanst@testlagret.se
www.testlagret.se

Testlagret AB
Box 4243
20313 Malmö, Sverige

